

Scotty

Montage instructies voor het Scotty-enkelgewricht

De sleutel tot de functie van de Scotty-enkelgewrichten komt van de juiste plaatsing en uitlijning van de gewrichten op de positieve mal. Hier zijn een paar suggesties voor een succesvolle installatie.

1. Voorafgaand aan het aanbrengen van het gips moet het distale uiteinde van de mediale en laterale malleoli en de gewenste plaatsing van het midden van de enkelgewrichten worden uitgelijnd.
2. Als u de positioneringsstang met schroefdraad wilt gebruiken, moet deze door de middenas van de enkelgewrichten worden aangebracht voordat de negatieve mal wordt gevuld. De juiste plaatsing van de stang helpt bij het verzekeren van een correcte uitlijning van de enkelgewrichten.
3. De mal wordt gevuld met gips.
4. Pas de mal naar wens aan, de positioneringsstang kan tijdens dit proces worden verwijderd.
5. Draai de meegeleverde zeskantmoer aan, zowel aan de mediale als de laterale zijde van de draadstaaf, zet de zeskantmoeren vast tegen de positieve mal.
6. Demonteer en plaats de proximale en distale staven op de vorm.
7. Bevestig het enkelgewricht en draai het vast met de twee extra zeskantmoeren.
8. Verwijder overtollig gedeelte van de draadstaaf.
9. Voorafgaand aan het vacuümvormen moet de ruimte tussen de verbindingen en de positieve mal worden gevuld met klei om te voorkomen dat het plastic zich volledig rond het enkelgewricht vormt.
10. Vacuümvorm positieve mal.
11. Markeer de trimlijnen en verwijder ze uit de positieve mal.
12. Markeer het midden van de enkelgewrichten en snijd het achterste deel van het plastic doorheen de enkelgewrichtsas. **Opmerking:** misschien wilt u de enkelgewrichten mediaal of lateraal markeren om verwarring tijdens de eindmontage te voorkomen.
13. Werk plastic randen af.
14. Zet de enkelgewrichten weer in elkaar.
15. Markeer en boor de proximale en distale bevestigingsgaten met een geschikte boor.
16. Bevestig verbindingen in het plastic met behulp van de meegeleverde bevestigingsschroeven.
17. Denk eraan om altijd loc-tite te gebruiken op alle schroeven die bij de eindmontage worden gebruikt.



Scotty-enkelgewricht omvat:

- 1 paar Scotty enkelgewrichten
- 8 0.6cm x 0.8cm Phillips roestvrij platbolkopschroeven (Scotty Long)
- 8 0.6cm x 0.8cm Phillips roestvrij platbolkopschroeven (Heavy Duty)
- 6 0.6cm x 0.8cm Phillips roestvrij platbolkopschroeven (Scotty Short)
- 4 0.6cm x 0.8cm Phillips roestvrij platbolkopschroef (Scotty Ped.)
- 4 zeskantmoer voor montage
- 2 nagels voor montage
- 1 positioneringsstang
- 1 polyurethane band (voor posterieure stop)

Accessoires

- Polycord stang stop (inbegrepen in kit)
- Scott bumper stop
- Scott verstelbare stop

Bestellen	Beschrijving	Dimensies			
		X		Y	
780-L/781-L	Grote Scotty enkelgewrichtsset	1/2in	13mm	3in	76mm
780-S/781-S	Kleine Scotty enkelgewrichtsset	1/2in	13mm	2-1/2in	64mm



635 Executive Dr | Troy, MI 48083
P: 800-521-2192 | 248-588-7480
BeckerOrthopedic.com | f t w in

©2020 Becker Orthopedic Appliance Co.,
All rights reserved.
Revision 04/30/20

EC REP

Acorn Regulatory Consultancy
Services Limited
Knockmorris Cahir Co. Tipperary
Ireland, Postcode: E21 R766
P 012 4626 8456
F 012 4626 8548

