

9005/9006-GX-ASSIST INSTRUKTIONER

1. Tillverka stödet enligt SafetyStride/FullStride monteringsinstruktioner (Bild 1).



Bild 1

2. Byt försiktigt ut sväng- och spakbussningarna med de längre bussningarna som ingår i GX-assistanssatsen.



Bild 2

3. Installera fästplattan (Bild 2).

4. Fäst den centrala vridskruven. Shims kan placeras under skruvhuvudet, om det behövs, för att säkerställa en korrekt passform (Bild 3).



Bild 3

5. Kontrollera att skarven fungerar korrekt.



Bild 4

6. Anslut den pneumatiska fjädern på fästplattan genom att sätta in stiftet och e-klämman. (Bild 4).



Bild 5

7. Om mer fjäderrotation behövs kan fästplattans arm vinklas något (Bild 5).

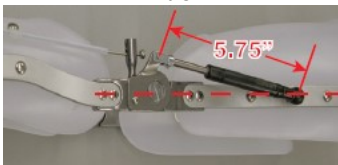


Bild 6

8. Borra ett 13/64 "hål intill fogens centrum, 5,75" från fjäderfästets centrum (stänger måste kontureras innan hålet placeras uppmätt) (Bild 6).

WARNING: Proximalt fjäderfäste måste vara i linje med fogens centrum. Felaktig montering kan skada den pneumatiska fjädern. Kontrollera att fjädern inte begränsar knäleds-ROM före användning.

9005/9006- GX-ASSIST INSTRUKTIONER

9. Lossa klämman och ta bort kulbulten från uttaget (Bild 7).

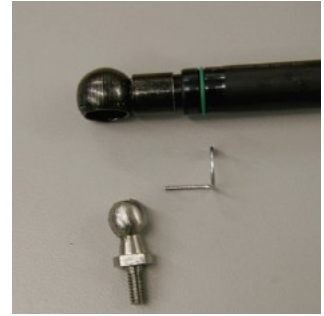


Bild 7

10. Fäst kulbulten och chicago-bussningen i ortosen (Bild 8).



Bild 8

11. Sätt tillbaka kulbulten i kulhylsan och säkra med kulhylsan.

31. Fästplatta

32. Pneumatisk fjäder

32A. Stålstift

32B. Chicago bussning

32C. Rod Clevis-klämman

32D. Klämman för kuluttag

32E. E-klipp


33A. Vridskruv

33B. Svängbussning

33C. Plastplattor

35A. Vridskruv

35B. Svängbussning

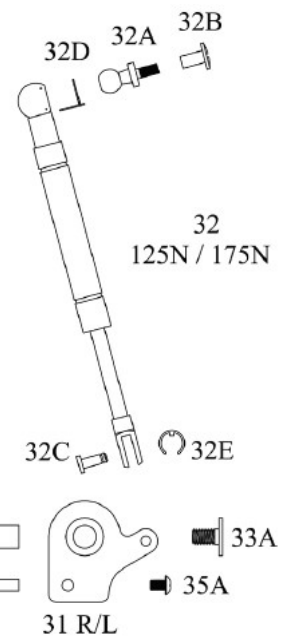

WARNING: Punktera inte. Pneumatisk fjäder under tryck.



635 Executive Dr | Troy, MI 48083
P: 800-521-2192 | 248-588-7480
BeckerOrthopedic.com | f t in

©2020 Becker Orthopedic Appliance Co.,
All rights reserved.
Revision 04/30/20

EC REP

Acorn Regulatory Consultancy
Services Limited
Knockmorris Cahir Co. Tipperary
Ireland, Postcode: E21 R766
P 012 4626 8456
F 012 4626 8648

