

Monteringsinstruktioner för Lerman **HARO 2000™**

- Välj enhetens storlek baserat på midjemåttet:

Modell 145	
Liten	71 - 81 cm
Medium	86 - 97 cm
Stor	102 - 112 cm
Extra stor	117 - 127 cm
Plusstorlek	132 - 142 cm

Modell145-U (Universal)	
Liten/medium	71 - 97 cm
Stor/extra stor	97 - 122 cm
Plusstorlek	122 - 147 cm



- Ställ in höftabduktionen med den medföljande insexnyckeln 1/8" innan den tas på. (SE BILD. 1.)
- Ställ in flexion/extension gränserna med den medföljande insexnyckeln 9/64". (SE BILD. 1.)
- Se till att dra åt dessa skruvar ORDENTLIGT när du är klar.

Påklädning av Lerman **HARO 2000™**

- Placera patientens lår i lårmanschetten när han/hon ligger i sängen. Undvik konflikt med knäflexionen när lårmanschetten tas på.
- Skjut in det bakre fodret under patientens rygg. Den övre delen på det främre bandet ska vara jämnt med övre höftbenskammen. Fäst bäckenbandet med kroken och remmarna.
- När patienten har på ortosen kan höftleden riktas in tvärgående. Lossa fästskruvarna på bäcken- och lårbensdelarna, rotera därefter leden internt eller externt, tills den följer progressionsgränsen för att göra det här. Spänn skruvarna för att behålla den önskade positionen. Ytterligare justering kan göras vid behov senare. (SE BILD. 2.)

Bild.
2

Skötselråd

- Visa patienten hur HARO tas av och på. För maximal hållkraft, betona att ludd, lösa trådar och annat material hålls borta från kroken.
- Vid nedsmutsning kan de fuktavvisande fodren tvättas för hand med mild tvål och lufttorkas.
- Om de giftfria, latexfria RC-banden tappar greppförmågan, kan de tvättas med tvålvatten, sköljas och lufttorka innan de används.